

通気性に優れ・安定感抜群
クノン・パワーベルト
 仙腸関節・腰部固定 二重構造によりパワーアップ



本体：補助ベルトによる二重固定

二次疼痛およびズレ防止パット付

特長

- ◆腰部を安定させ、疼痛を緩和。
- ◆腹部の圧迫感が非常に少ない為、ゴルフ・スポーツ時でも機能的動作が容易。
- ◆ワンタッチ着脱
- ◆締め付け感がなく、効果的。

装着方法

効果的に使用するには、上前腸骨棘より1cm下(俗に腰骨)にコルセットの上のラインがくるように装着。

本「老筋力」文庫版 P137参照

注意事項

- 肌着の上から装着してください。
- 二重になっているゴム部分を取りはずし、メッシュ部分のみ中性洗剤で手洗して下さい。(ゴム部分は、あまり洗うと伸びてしまいます。)

製品規格

サイズ	適用範囲(腰骨まわり)
M	75cm～90cm
L	90cm～105cm
LL	105cm～120cm

販売元 久野薬品 MADE IN JAPAN


名古屋市南区明円町15-3 協力 久野接骨院
 TEL. 052-821-2222 FAX. 052-821-6666

クノン・パワーベルト装着方法

上部についているパットが内側になります


装着時、ブランドネームは右上になります

ベルト左右先端を引っ張りながら止める。

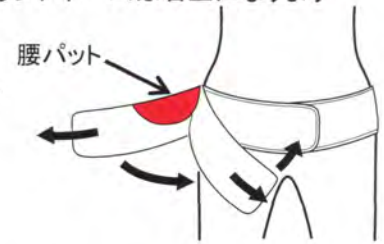

【ポイント】

本体ベルトを強めに巻き、補助ベルトを引っ張りながら装着
 ゴムバンド(補助ベルト)も同様に装着

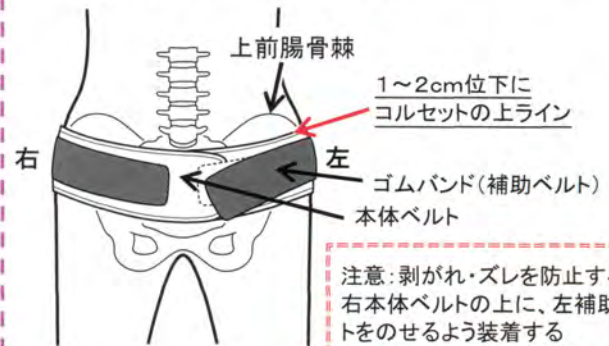

注意：剥がれ・ズレを防止するため
 右本体ベルトの上に、左補助ベルトをのせるよう装着する

クノンパワーベルト 購入について

クノンパワーベルトのご購入を希望される方は、下の申込書に必要事項をご記入していただき、必ず**現金書留**で、商品代金4,000円(税込・送料込)と申込書を同封の上、久野接骨院までご郵送ください。

■商品代金

4,000円(税込・送料込)

■現金書留・申込書 郵送先住所

〒457-0022 愛知県名古屋市南区明円町15-4

■製品規格

サイズ	適用範囲(腰骨まわり)
M	75cm～90cm
L	90cm～105cm
LL	105cm～120cm

■お問合せ電話番号

TEL. 052-821-2222

営業時間 平日：AM9:00～PM12:00/PM4:00～PM8:00 土曜：AM9:00～PM2:00
 定休日 日曜、祝日 木曜は午前中休診

ご注意

※商品の発送は申込書到着後、通常3営業日以内に発送する予定ですが、在庫状況によって遅れる場合がございますので、予めご了承ください。
 ※ご申込後のキャンセル・返品・交換はお受けできません。万が一、商品が不良品の場合には、この限りではございません。

(キリトリ線)

クノンパワーベルト購入申込書

記入日 年 月 日

サイズ	数量	ご住所	お名前
M	個	〒	フリガナ
L	個		
LL	個		電話番号